



Nombre del Producto COLLAR EXTRICACION UNIVERSAL

Código CC-0230U

Marca Blunding

Fabricante Blunding

Descripción El collar de extricacion Blunding es un dispositivo rígido de inmovilización de la columna cervical, diseñado para ayudar al rescatador con el mantenimiento de la alineación neutral, la prevención de balanceo lateral (de lado a lado) y anterior/posterior (hacia adelante y hacia atrás) la flexión y extensión de la columna cervical durante el transporte y el cuidado o movimiento de rutina del paciente. Cuenta con un ajuste de altura múltiple: tamaño universal que permite posicionarlo en 4 distintas tallas. Utiliza el mismo tamaño y método de aplicación que los collares Stifneck® originales.

Indicaciones Situaciones donde se necesite inmovilizar totalmente la columna cervical:
Antes y después de operaciones quirúrgicas de la columna cervical
Cuidados de la columna cervical para pacientes con traumatismos
Ayuda a la extracción segura del paciente con traumatismos

Más información



Contiene Látex No

Beneficios	Elaborado en Plastazote®; producto no tóxico Una sola referencia ofrece 4 tallas. Se almacena plano. Menor uso de espacio. No necesita montaje. Soporte total del arco cervical. Ofrece un fácil acceso a control de pulso carotídeo y técnicas avanzadas de vía aérea Permite la palpación de la zona cervical y permite el drenaje de sangre y otros fluidos Radiotransparente. Compatible con resonancia magnética y tomografía computarizada Fácil de limpiar con agua y jabón Ajuste con velcros	
Composición	Polietileno de alta densidad con relleno de espuma	
Peso del producto (g)	127	
Alto / Ancho / Largo Producto (Cm)	63 x 24 x 5	

Color	Azul/ Blanco / Amarillo
--------------	-------------------------

Código de barra	SKU	Talla	Código de Barra
	CC-0230U	Unica (28 – 58 cm)	7801001015924

Mantenición de Producto

Limpie con productos neutros, seque cuidadosamente y con movimientos suaves, todos los componentes.
 No use limpiadores abrasivos ni volátiles

No someta la unidad, ni sus componentes, a frio, calor o humedades extremas.

Revise frecuentemente la integridad de las partes y piezas del producto

Lavar a mano con detergente suave.

El producto se debe almacenar seco y protegido de la luz solar directa.

No almacenar el collarín en posición plegada.

Almacenar en posición plana.

Garantía

Este producto tiene una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del Manual de Instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original. Esta ortesis debe colocarla y ajustarla un profesional sanitario. Un collar de extracción es solo una parte de la inmovilización total del paciente.

No confíe únicamente en el collarín para lograr la inmovilización completa. Es importante que los profesionales estén capacitados y tengan práctica en el uso y la aplicación de los dispositivo y que todas las instrucciones sean leídas y entendidas antes de la aplicación del collar. Todas las instrucciones deben considerarse como pautas y no como un intento de definir la práctica médica.

Certificación y Registros

Blunding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO ISO 9001:2015 (N° CL13/20100668), Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14 y Registro FDA N° 9104922