

Nombre del Producto MITÓN ADULTO

Código E-750

Fabricante Chile

Marca Blunding


Descripción Inmovilizador de mano ambidiestro, confeccionado en popelina y tulipán con relleno de napa. Dos barras plásticas flexibles, ajustable con cierre de contacto que impide la flexión de dedos y restringe la movilidad de la mano al asegurar el mitón con cinta a la baranda lateral de la cama. ■

Indicaciones Pacientes con riesgo de interrumpir tratamientos médico, por ejemplo, al halar dispositivos médicos que suministran oxígeno, medicamentos o anestesia.

Pacientes con riesgo de retirarse el equipo medico que hace seguimiento de sus signos vitales.

Pacientes de postoperatorio o en unidad de cuidados intensivos, unidad de ictus, departamento de rehabilitación y/o neurología.

Pacientes cuyo pellizcar, halar o rascar puede exacerbar una lesión o afección de piel.

Pacientes que pueden provocarse lesiones o comprometer la integridad de una herida.

Contiene Látex No

Componentes	1 Un Mitón adulto
Beneficios	<p>Fácil ajuste. Cierre con velcro que permite regular el producto rápidamente.</p> <p>Respirable. Producto elaborado con materiales livianos que permiten eliminar rápidamente la humedad y el sudor de la piel, previniendo lesiones cutáneas por maceración y abrasión.</p> <p>Producto ligero y duradero.</p> <p>Producto muy fácil de limpiar, simplemente lavar con agua y jabón.</p> <p>Permite una inspección visual rápida y fácil de la circulación de la mano.</p>
Alto / Ancho / Largo Producto (Cm)	(32 x 18 x 3) Cm
Peso del producto (g)	132
Composición	<p>Cara Interna: ■la popelina poligal 50% Algodón / 50% Poliéster</p> <p>Cara Externa: ■00% Tela Tulipán</p> <p>Relleno: ■napa termofill 110 grs</p> <p>Barras Plásticas: ■00% Polipropileno</p> <p>Cierre de Contacto: ■00% Nylon</p>
Color	Blanco

Código de barra

SKU	Talla	Código de Barra
E-750	UNICA	7801001007479

Mantenición de Producto	Cuando finalice el tratamiento, y al menos una vez cada semana, si lo usa a diario, o con mayor frecuencia, si el uso es más esporádico revisar la integridad de las partes y piezas de la contención de pacientes (costuras, velcros, integridad de los textiles) para detallar si existe algún tipo de desgaste.
Mantenición de Producto	<p>Esta prenda se puede lavar a máquina. En estos casos, se recomienda pasar sobre el velcro un rodillo quita-pelusas, un trozo de cinta adhesiva o un cepillo con cerdas duras, para eliminar la suciedad superficial. Junte ambas partes del cierre de velcro antes de meter el producto en la lavadora, con la finalidad de evitar que se incrusten hilos, pelos u otras fibras en el velcro y que la parte adhesiva del cierre dañe otras prendas en la lavadora, a continuación, introduzca la contención en una funda de cojín o en una bolsa de lavado, para evitar que se adhieran pelusas a las fibras del producto, así como al cierre velcro.</p> <p>El lavado debe ejecutarse siguiendo las recomendaciones de la Directiva para Dispositivos Médicos para productos sanitarios pertinentes y los requisitos que se apliquen a nivel nacional, tomando en cuenta los siguientes parámetros:</p> <p>Asegúrese de no dejar el producto en contacto con agua por mucho tiempo (no remoje).</p> <p>Pase sobre el velcro un rodillo quita-pelusas, un trozo de cinta adhesiva o un cepillo con cerdas duras, para eliminar la suciedad superficial. Junte ambas partes del cierre de velcro antes de meter el producto en la lavadora, con la finalidad de evitar que se incrusten hilos, pelos u otras fibras en el velcro y que la parte adhesiva del cierre dañe otras prendas en la lavadora.</p> <p>Lavar a máquina con agua a temperatura máxima de 30 ° C, con detergente y un ciclo suave.</p> <p>No retorcer, ya que esto puede dañar la muñequera.</p> <p>No lavar con lejía</p> <p>No utilizar limpieza química/lavado en seco</p> <p>No planchar</p> <p>Secar preferiblemente a la sombra.</p> <p>Para prolongar la vida de la prenda, lávela a mano y déjela secar en posición horizontal.</p> <p>El producto se debe almacenar seco y protegido de la luz solar directa.</p>

Garantía

Este producto tienen una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del manual de instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original. Al recibir este producto usted declara conocer los fines para los cuales fue diseñado.

Certificación y Registros

Blunding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO ISO 9001:2015 (N° CL13/20100668), Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14 y Registro FDA N° 9104922