



Nombre del Producto CORSET DE HIPEREXTENSION BLUNDING

Código CC-703

Marca Blunding

Fabricante Blunding

Descripción El corset Jewett es una ortesis especializada que alivia la carga en la columna lumbar y torácica, proporcionando estabilidad y control en los planos sagital y frontal. Reclina la columna lumbar y torácica inferior, fijando la columna lumbar en posición de hiperlordosis y limitando el movimiento en los planos sagital y frontal. Cuenta con almohadillas de apoyo superior infraclaviculares, lo que proporciona mayor comodidad, reduce la presión sobre el esternón y mejora la distribución de la fuerza sobre la pared torácica. Además, incluye un cierre de trinquete para ajuste preciso. Producto diseñado para ofrecer comodidad: 100% ajustable, de bajo peso y acolchado.

Indicaciones Todas las indicaciones que requieran un alivio parcial de la columna lumbar / torácica, así como la restricción del movimiento en el plano sagital y frontal:

Fracturas estables por compresión vertebral de la parte media e inferior de la columna torácica y lumbar, Cuidado ortopédico postoperatorio temporal,

Tratamiento no quirúrgico inoperable o postoperatorio de los tumores y metástasis de la columna vertebral, Estabilización axial para el colapso vertebral osteoporótico de la columna torácica y lumbar.

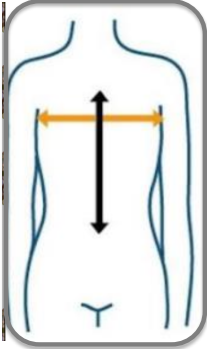
Más información



Contiene Látex No

Componentes	1 UN Corset hiperextensión Blunding
--------------------	-------------------------------------

Beneficios	Cierre sencillo gracias a la fijación de la órtesis con cierre de trinquete. Alto nivel de comodidad gracias a la construcción ligera y al cómodo acolchado.	
	Mayor comodidad al estar sentado gracias a la placa de sínfisis móvil. La longitud y el ancho, de este producto, se pueden ajustar para adaptarse a cada paciente.	

Tabla de medidas 	Para que el tratamiento sea óptimo, uno de los requisitos previos es una medición correcta. La circunferencia de la cintura, determina la talla que se debe seleccionar. Para un mejor manejo y legibilidad, las dimensiones se indican en centímetros enteros. Los posibles intervalos entre medidas, quedan cubiertos por las tolerancias de medición y fabricación. Al determinar la talla, se aplican las reglas internacionales de redondeo (redondeo a la baja hasta 4/10, redondeo al alza a partir de 5/10). Esto se ha tenido en cuenta al diseñar las cintas métricas MEDI y Blunding.
---	---

	Medida	S	M	L	XL
Ancho del pecho- cm entre las axilas	Pecho	32-36	35-39	38-44	40-48
Largo del pecho a cintura- cm		22-26	26-30	29-35	31-39
Composición	Aluminio, PVC				
Peso del producto (g)	1100				
Alto / Ancho / Largo Producto (Cm)	54 x 25 x 42				
Color	Gris				

Código de barra

codigo	nombre	Código de Barra
CC-703S	Talla S	7801001017409
CC-703M	Talla M	7801001017393
CC-703L	Talla L	7801001017386
CC-703XL	Talla XL	7801001017416

Mantenimiento de Producto

La órtesis no es apta para su uso en agua salada y/o piscinas.

Tras un empleo en agua clorada, deberá enjuagarse en profundidad con agua corriente.

Los restos de jabón pueden causar irritaciones cutáneas y desgaste del material.

La ortesis debe limpiarse con un paño húmedo y la almohadilla estabilizadora de la espalda con un cepillo.

No blanquear.

Secar al aire.

No planchar

No limpiar en seco.

Comprobar regularmente la solidez de los tornillos y, en caso necesario, volver a atornillar.

Guarde el dispositivo ortopédico en un lugar seco.

No lo exponga a la luz solar directa

Garantía

Este producto tienen una garantía legal de 6 meses, establecida por la Ley 19.496 y 21.398 Sobre Protección de los Derechos de Los Consumidores (Para compras anteriores al 24 de marzo 2022 la garantía legal es de 3 meses). Este plazo es contado desde la recepción o retiro del producto para compras electrónicas, telefónicas o por catálogos. La correcta fabricación, mano de obra y materiales de este producto están garantizados y durante el periodo de garantía se le devolverá el dinero o sustituirá, sin coste de mano de obra o piezas, el producto que, a nuestro juicio, resulte defectuoso, siempre y cuando el consumidor haya seguido las indicaciones del manual de instrucciones y devuelva el mismo completo y en su envase original. El producto se debe usar exclusivamente para el ajuste ortésico y solo sobre piel intacta. Utilice el producto sobre una prenda fina. Es importante que lo ajuste de acuerdo con las instrucciones de su médico.

Certificación y Registros



Blunding S.A posee Sistema de Gestión de Calidad Certificado bajo la Norma ISO 9001:2015 (N° CL13/20100668), Registro del Instituto Nacional de Salud Pública N° EDM 198/14 y Registro FDA N° 9104922